




FLEX


Attends Flex sind ein Sortiment von saugfähigen Slips für starke Harn- und/oder Stuhlinkontinenz mit speziellen Saugkanälen für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit und einem flexiblen Hüftband für Komfort.




Anlegehinweise

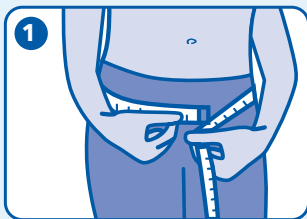


Messen Sie den Bauch- und Hüftumfang und nehmen Sie den größeren der beiden Werte, um die richtige Größe des Produkts auszuwählen.

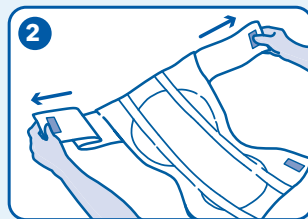


Öffnen Sie das Produkt vollständig und falten Sie die Flügel vollständig auseinander. Die Flügel mit den Klebestreifen kommen nach hinten. Die bedruckte Außen-seite kommt nach außen.

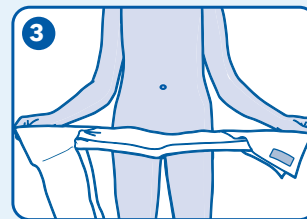


Falten Sie die Vorlage in Längsrichtung zu einem Schiffchen. Achten Sie darauf, dass sich die Auslaufsperrn ausrichten.

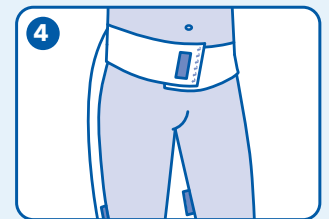


Legen Sie den Hüftgürtel um die Taille/Hüfte. Fixieren Sie den Gürtel mit dem Klettverschluss vorne und drücken Sie ihn gut an.

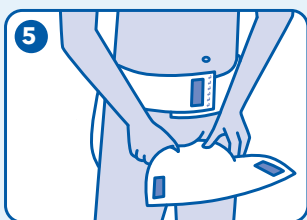

Ziehen Sie den saugenden Teil vorsichtig nach vorne, halten Sie ihn dabei in Längsrichtung gefaltet und mit aufgerichteten Auslaufbarrieren. Legen Sie das Produkt eng in den Leisten an.

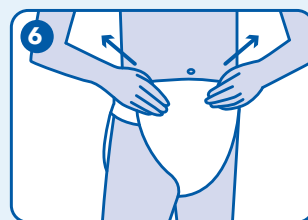

Streichen Sie das Produkt glatt und kletten Sie es am Hüftgürtel fest. Drücken Sie dabei auf die blauen Klettflächen, damit es richtig hält.

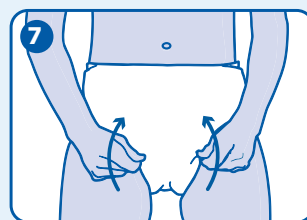

Falls nötig korrigieren Sie nochmals, bis das Produkt auch in den Leisten eng anliegt und nicht nach innen geklappt ist.

FLEX

Hinweise und Tipps

Auswahl

- Wählen Sie die richtige Größe der Attends Flex entsprechend Ihres Bauch- oder Hüftumfangs. Nehmen Sie dabei den größeren der beiden Werte.
- Wählen Sie die Saugstärke entsprechend der Flüssigkeitsausfuhr. Versuchen Sie es zunächst mit einer kleineren Saugstärke. Falls diese nicht ausreicht, gehen Sie zur nächsthöheren Saugstärke.

Anziehen

- Falten Sie die Vorlage in Längsrichtung zu einem Schiffchen. Ziehen Sie das Produkt gerade hoch bevor Sie die Klebestreifen am Bund befestigen. Wenn notwendig positionieren Sie das Produkt erneut.
- Es wird von hinten nach vorne angelegt und fixiert.
- Legen Sie das Produkt mithilfe des Nässeindikators mittig an.
- Drücken Sie die Klettstreifen beim Verschließen sorgfältig an.
- Wenn Sie das Produkt am liegenden Patienten anlegen, achten Sie auf dieselbe Reihenfolge wie beim stehenden Patienten.



Hautverträglichkeit bestätigt von SGS proderm GmbH, Institut für dermatologische Forschung und Prüfung. Getestet im Auftrag von Attends

Wechseln

- Prüfen Sie den Nässeindikator. Wenn der Nässeindikator bis auf eine Handbreit am oberen Rand verschwommen ist oder wenn Stuhl enthalten ist, sollte das Produkt gewechselt werden. Falls er weniger stark verschwommen ist und kein Stuhl enthalten ist, kann das Produkt weiter verwendet werden.
- Wenn das Produkt noch sauber und trocken ist, kann es nach dem Toilettengang erneut angelegt werden.
- Gebrauchte Produkte immer von vorne nach hinten ausziehen, um Keimverschleppung zu vermeiden.
- Bei der Intimhygiene reinigen Sie den Intimbereich ebenfalls immer von vorne nach hinten.

Bei Auslaufproblemen

- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Saugstärke verwenden und das Produkt korrekt angelegt ist.
- Prüfen Sie, ob die Fixierhose die richtige Größe hat.

Entsorgung

- Rollen Sie das ausgelastete und/oder verschmutzte Produkt zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.
- Bitte auf keinen Fall über die Toilette entsorgen. Verstopfungsgefahr. Inkontinenzprodukte gehören nicht in den Verpackungsmüll und nicht in den Biomüll.