

Bettbeutel

Conveen®

Beutel-Aufhängung



Gebrauchsanweisung

23323455 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2020-04-28

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Urinbeutel dient der passiven Sammlung von Urin.

Indikationen

Urinbeutel sind für Patienten bestimmt, die unter Harninkontinenz und/oder Harnverhalt jeglicher Ätiologie leiden.

Warnhinweise

Eine Wiederverwendung dieses Produkts für den Einmalgebrauch wird aufgrund des Risikos von Kreuzkontamination nicht empfohlen.

Wiederaufbereiten, Waschen, Desinfektion und/oder (Re-)Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und ein zusätzliches Körperverletzungs- oder Infektionsrisiko für den Anwender verursachen.

Informationen

Der Beutel ist für den Einmalgebrauch bestimmt.

Der Beutel hat ein Fassungsvermögen von 2000 ml.

Die aufgedruckte Volumenanzeige gibt lediglich die ungefähre Füllmenge an.


Die Produkte sind bis zur Entnahme zur Verwendung im Karton aufzubewahren, da der Karton die Produkte schützt und das Kartonetikett wichtige Informationen wie Chargennummer, Verfallsdatum sowie einen eindeutigen Strichcode enthält.

Coloplast schließt jede Haftung für Verletzungen oder Schäden aus, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Wiederverwendbare Produkte

Die maximal erlaubte Anzahl der Anwendungen für die Beutelaufhängung beträgt eine Verwendung pro Tag für eine Dauer von 5 Jahren.


Vorbereitung

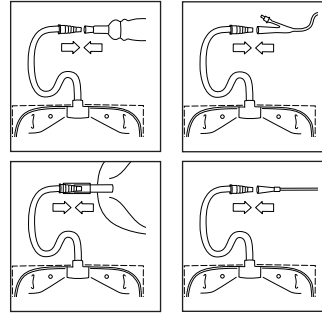

Unsterile Bettbeutel können direkt an ein Kondom-Urinal angeschlossen werden.


Oder Sie verbinden den Bettbeutel mit einem Beinbeutel, um während der Nacht für zusätzliches Fassungsvermögen zu sorgen. Für den Übernachtanschluss muss der Beinbeutel über einen elastischen Auslassschlauch verfügen. Der Konnektor des Nachtbeutels wird dann mit diesem Auslassschlauch verbunden.

Intermittierende Katheterisierung
Bettbeutel können zur Katheterisierung mit einem intermittierenden Katheter verbunden werden.

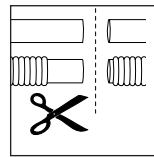


Ist der Konnektor nicht bereits mit dem Schlauch verbunden, oder wurde der Schlauch nicht zuvor am Beutel befestigt, können Sie den Schlauch auf die bevorzugte Länge anpassen.


Kürzen Sie den Schlauch einfach mit einer Schere. Achten Sie beim Kürzen des Schlauchs darauf, dass möglichst viel des glatten Bereichs erhalten bleibt.

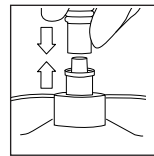

Den Schlauch am Beutel befestigen, indem das Schnittende des Schlauchs fest auf den Einlassanschluss des Beutels geschoben wird.

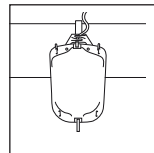

Verwenden Sie die Conveen Beutel-Aufhängung um den Bettbeutel aufzuhängen.

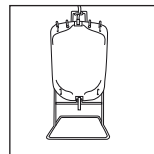


Befestigen Sie den Beutel sicher an der Aufhängung indem Sie die Zapfen der Aufhängung oben am Beutel einführen. Haken Sie die Beutelaufhängung am Bettgestell ein.

Um eine optimale Drainage sicherzustellen, ist es wichtig, den Bettbeutel niedriger als die im Bett liegende Person zu positionieren.



Intermittierende Katheterisierung

Hängen oder platzieren Sie den Beutel so, wie es für Sie am bequemsten ist und stellen Sie sicher, dass der Beutel niedriger ist als Ihr Hüftbereich, unabhängig davon, ob Sie lieber sitzend, stehend oder liegend katheterisieren.

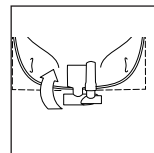



Stellen Sie sicher, dass der Auslass geschlossen ist.

Anwendung

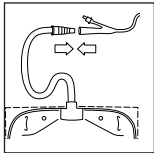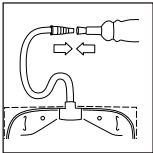

Entfernen Sie gegebenenfalls die Schutzkappe vom Konnektor.


Befestigen Sie den Konnektor am Kondom-Urinal.

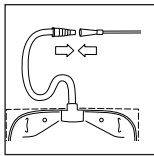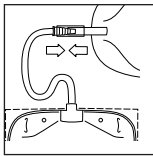

Oder schließen Sie den Konnektor an den Auslass des Beinbeutels an. Öffnen Sie dann den Beinbeutelenauslass.

Das Urindrainagesystem ist nun einsatzbereit.

Intermittierende Katheterisierung
Schließen Sie das Verbindungsstück an den intermittierenden Katheter an. Wenn Sie mit der Katheterisierung beginnen, wird der Urin in den Bettbeutel abgelassen.

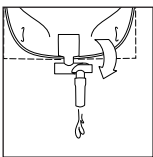

Wir empfehlen, den Beutel zu leeren, wenn er etwas mehr als halb voll ist, damit eine optimale Drainage sichergestellt ist.

Intermittierende Katheterisierung
Leeren Sie den Bettbeutel nach jeder Katheterisierung.

Entfernen

Trennen Sie den Bettbeutel vom Kondom-Urinal.


Oder schließen Sie, wenn der Bettbeutel mit einem Beinbeutel verbunden ist, den Auslass des Beinbeutels. Trennen Sie dann den Bettbeutel. Berühren Sie nicht das offene Ende des Auslassschlauchs des Beinbeutels.

Intermittierende Katheterisierung

Nach Abschluss der Katheterisierung trennen Sie den Bettbeutel vom intermittierenden Katheter.

Beutel von der Aufhängung abnehmen.

Entsorgung

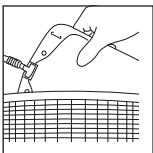

Wechseln Sie den Beutel gemäß lokaler Richtlinien und Empfehlungen aus.

Die Beutel-Aufhängung kann erneut verwendet werden.

Entleeren Sie den Beutel, bevor Sie ihn entsorgen.

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Produkt nicht in der Toilette.

Meldung von Vorfällen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorkommnis gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.

Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte



Katalognummer



Haltbarkeitsdatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Nur für den einmaligen Gebrauch



Unsteril



Zeigt an, dass ein Barcode eine Unique Device Identification (UDI) enthält



(Global Trade Item Number) Globale Artikelnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Recyclingfähige Verpackung