

Pflasterentferner Spray



Gebrauchsanweisung

23323408 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2020-05-14

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Brava Pflasterentferner Spray ist für das Entfernen medizinischer Haftmaterialien von einer intakten Haut bestimmt.

Vorsichtsmaßnahmen

Vermeiden Sie eine direkte Anwendung auf nicht intakter Haut, wie Wundgründen und Schleimhäuten (Augen, Ohren, Nase, Mund, Vagina), da dies Hautirritationen verursachen kann.

Vermeiden Sie ein direktes Einatmen, da dies zu einer vorübergehenden Reizung der Atemwege führen kann.

Aufgrund ihrer unreifen Haut wird die Anwendung bei Frühgeborenen, Neugeborenen oder Säuglingen unter 4 kg nicht empfohlen.

Extrem entzündbares Aerosol – Gefahr

Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.

Informationen

Das Produkt basiert auf Silikon und kann wiederverwendet werden. Das Produkt trocknet in Sekundenschnelle und hat keine Auswirkung auf die Haftfähigkeit nachfolgender Versorgungen.

Inhaltsstoffe: Enthält ein Gemisch von Alkylsiloxanen.

Coloplast schließt jede Haftung für Verletzungen oder Schäden aus, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Anwendungshinweise

1. Das Produkt um den Rand des Haftmaterials sprühen.

2. Nach ein paar Sekunden das Haftmaterial behutsam abziehen. Vorgang ggf. wiederholen.

Entsorgung

Das Produkt mit anderen Sprühdosen entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Meldung von Vorfällen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorkommnis gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.

Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte



Katalognummer



Haltbarkeitsdatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Gibt die Höchsttemperatur an, der das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann



Achtung



Zeigt an, dass ein Barcode eine Unique Device Identification (UDI) enthält



(Global Trade Item Number) Globale Artikelnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Recyclingfähige Verpackung



Entspricht der Richtlinie 75/324/EWG über Aerosolpackungen



Extrem entzündbar